

Intrafix® SafeSet Flush

Infusionssystem für verbesserte Medikamentenapplikation

1 EINSTECHEN DES DORNES IN DAS INFUSIONSLÖSUNGSBEHÄLTNIS



1. Infusionsbesteck auspacken. Überprüfen, ob Belüftungsklappe geschlossen und Rollenklemme geöffnet ist.
2. Intrafix® SafeSet Flush in das Behältnis einstechen.
3. Rollenklemme schließen.
4. Tropfkammer kopfüber halten und Rollenklemme öffnen. Befüllen Sie die Tropfkammer bis zum grünen Umspritzungsring (siehe Abbildung).
5. Tropfkammer wieder in Ausgangsposition bringen. Durch initiales Drücken der Tropfkammer bringen Sie das System zum Laufen. Entlüften Sie die Leitung nun vollständig. Die PrimeStop-Kappe mit integrierter hydrophober Membran dient einem zeitsparenden und hygienisch sauberen Arbeiten. Sie ermöglicht dadurch das automatische Befüllen des Infusionssystems.

2 KONNEKTION DER SEKUNDÄRLEITUNG



- 1 Stechen Sie die Intrafix® Primeline Sekundärleitung in das Medikamentenbehältnis ein.
- 2 Schließen Sie die weiße Klemme der Sekundärleitung.
- 3 Desinfizieren Sie das integrierte nadelfreie Membranventil Caresite® am Intrafix® SafeSet Flush und konnektieren Sie die Sekundärleitung.
- 4 Befüllen Sie nun die Tropfkammer bis zum weißen Umspritzungsring.



3 START DER MEDIKAMENTEN-APPLIKATION



1. Schließen Sie die weiße Klemme des Intrafix® SafeSet Flush (Hauptleitung)
2. Öffnen Sie dann die weiße Klemme der Intrafix® Primeline Sekundärleitung.
3. Regulierung der Durchflussrate über die Rollenklemme.

Hinweis: Dank der Inline-Tropfkammer des Intrafix® SafeSet Flush ist kein zusätzliches Entlüften der Sekundärleitung notwendig. Die Luft entweicht automatisch über die Tropfkammer.

4 ENDE DER APPLIKATION & ENTSORGUNG DES SYSTEMS



1. Schließen Sie die weiße Klemme der Sekundärleitung, nachdem das Medikament vollständig appliziert wurde. Die Tropfkammer mit angeschlossenem Infusionsschlauch läuft komplett leer.
2. Öffnen Sie die weiße Klemme der Hauptleitung.
3. Spülen Sie das Infusionssystem (Hauptleitung) nach jedem Medikament bzw. am Therapieende.

Das System kann anschließend vom Patientenzugang dekonnektiert und verworfen werden.

Weitere Informationen zur Risikoprävention in der Infusionstherapie finden Sie unter:

www.sichereinfusionstherapie.de



Hinweis: Bitte kontrollieren Sie immer den Flüssigkeitsspiegel der Tropfkammer. Falls notwendig, füllen Sie die Tropfkammer durch erneutes Drücken ein weiteres Mal. Rollenklemme ist zuvor in geschlossene Position zu bringen.