



EINSATZGEBIETE


- Dekubitalucera
- Diabetische Fussulcera
- Chirurgische Wunden

Askina® DresSil Heel

DER SILIKONBESCHICHTETE SCHAUMSTOFFVERBAND
MIT HAFTRAND FÜR DIE FERSE

Askina® DresSil Heel

DER SILIKONBESCHICHTETE SCHAUMSTOFFVERBAND MIT HAFTRAND FÜR DIE FERSE

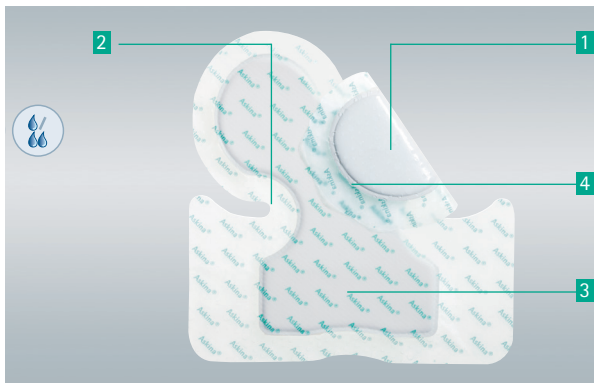

- 1 Silikon-Haftfläche
- 2 Silikon-Haftrand
- 3 Polyurethan-Schaum
- 4 Polyurethan-Film

VORTEILE

- Optimal zur Versorgung von Wunden im Bereich der Ferse sowie des Innen- und des Außenknöchels
- Sichere und hautschonende Hafteigenschaften durch Silikonbeschichtung
- Druckentlastende Eigenschaften des Polyurethan-Schaums können der Entstehung von Wunden vorbeugen
- Einfaches und schnelles Anlegen und Entfernen
- Sehr gutes Exsudat-Management

IN WENIGEN SCHRITTEN ZUM ZIEL



Ziehen Sie die obere Schutzfolie ab.



Modellieren Sie den Verband an Innen- und Aussenknöchel an und lösen Sie die untere Schutzfolie.



Platzieren Sie die Ferse oberhalb der unteren Schutzfolie auf dem Verband.



Modellieren Sie den Verband abschliessend an die Ferse.

PRODUKTÜBERSICHT

| Produkt | Größe mit HR* | VE | Art.-Nr. | Tarif Nr. | PZN |
|---------------------|---------------|---------|----------|-----------|---------|
| Askina®DresSil Heel | 22 x 21,6 cm | 5 Stück | 5592205 | 51456/015 | 4356107 |



*HR = Haftrand

B. Braun Austria GmbH | Otto Braun-Straße 3-5 | 2344 Maria Enzersdorf | Tel 02236 46541-0
Fax 02236 46541-177 | bbraun.austria@bbraun.com | www.bbraun.at | www.facebook.com/bbraun.at