



Erhältlich im
Sanitätsfachhandel,
in Ihrer Apotheke
und bei Amazon

Größe	Stück / Box	Art. Nr.	PZN
Probierpackung	1 Stk. S + 1 Stk. M + 1 Applikator	3025AT	
Small	5 Stück + 1 Applikator	3132AT	4872168
Medium	5 Stück + 1 Applikator	3133AT	4872174
Small	15 Stück + 1 Applikator	3022AT	4872180
Medium	15 Stück + 1 Applikator	3023AT	4872205

B. Braun Austria GmbH | Otto Braun-Straße 3-5 | 2344 Maria Enzersdorf
Tel. 02236 46541-0 | Fax 02236 46541-177 | bbraun.austria@bbraun.com | www.bb Braun.at | www.facebook.com/bbraunat

CE 0123

Stand 10/2019



DIVEEN®

Intravaginales Kontinenztherapieprodukt
Wirksam bei unkontrolliertem Harnverlust durch Belastungsinkontinenz

Diveen® – lebe deine Freiheit!

Millionen von Frauen auf der ganzen Welt leiden unter Belastungsinkontinenz. Schwangerschaften und Geburten, Menopause, Übergewicht und urologische Probleme können die Ursache sein. Haben auch Sie schon die Erfahrung gemacht, beim Niesen, Husten, Laufen oder schweren Heben manchmal ungewollt ein paar Tropfen Urin zu verlieren?

Diveen® bietet diskrete Kontrolle bei ungewolltem Harnverlust

Diveen® ist ein intravaginales Medizinprodukt für Frauen, die unter ungewolltem Harnverlust vor allem durch Belastungsinkontinenz leiden. Diveen® ist so einfach anzuwenden wie ein Tampon und bietet 12 Stunden Kontinenzkontrolle.



Innovatives und patentiertes Konzept⁽¹⁾




Diveen® – Einzigartiges Funktionsprinzip zur signifikanten Reduzierung des Risikos von Harnverlust ohne chirurgischen Eingriff. Diveen® wurde entwickelt, um die innere Scheidenwand im Bereich unterhalb des Blasenhalses zu stützen. Bei Belastung, z.B. Husten, Lachen, sportliche Aktivitäten drückt die Blase auf den flexiblen Ring des Produktes. Dadurch kommt es zu einer kleinen Bewegung des starren Endstückes, die Harnröhre wird verschlossen.

Diveen® gibt dir die Freiheit!

☀ Einfach anzuwenden – wie ein Tampon

Diveen® besteht aus flexiblem, medizinisch geprüftem Material und kann mit oder ohne Einführhilfe verwendet werden.

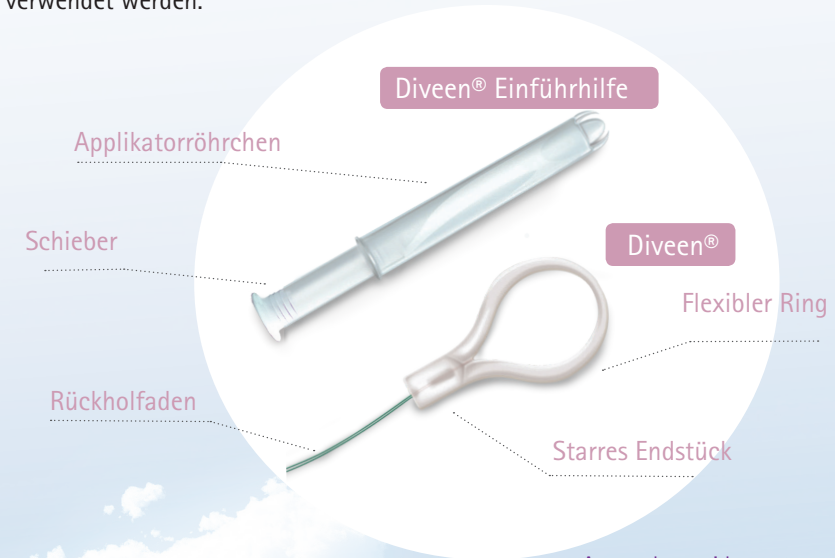

Anwendungsvideo unter www.bbraun.at/diveen



☀ Diskreter Schutz vor ungewolltem Harnverlust

Diveen® darf 12 Stunden im Körper verbleiben. Es braucht beim Urinieren nicht entfernt zu werden und darf bis zu 2-mal verwendet werden.*

☀ Von Frauen getestet und empfohlen

«Diveen® gibt mir wieder Vertrauen in meinen Körper. Jetzt gehe ich wieder laufen und tanzen und fühle mich sicher», Monika, 35

«Diveen® hat mir wieder Freiheit geschenkt und ist für mich die Alternative zu einem chirurgischen Eingriff», Petra, 46

Die Wirksamkeit von Diveen® wurde auch in einer klinischen Studie bestätigt. Die Häufigkeit von Harnverlust wurde um durchschnittlich 69% reduziert. Das emotionale Wohlbefinden der Anwenderinnen wurde wesentlich verbessert⁽²⁾.

(1) Brevet EP 1 924 218 B1

(2) Cornu J.N et al. 75NC007 device for noninvasive stress urinary incontinence management in women: a randomized control trial. International Urogynecology Journal 2012, 23 (12): 1727-34

*Bitte lesen Sie vor Anwendung die Gebrauchsanweisung. Verwenden Sie Diveen® nicht während Periode, Schwangerschaft und Geschlechtsverkehr und besprechen Sie die beste Versorgung für Ihre Inkontinenz mit Ihrem Arzt/Ihrer Ärztin.