

# Ureofix® 500 classic

## Mehr Sicherheit mit System

Geschlossenes Urinmess-System



**NEU: Mit Silikonport  
zur nadelfreien  
Probenentnahme**

**B | BRAUN**  
SHARING EXPERTISE

# Ureofix® 500 classic

## Mehr Sicherheit mit System

B. Braun kann auf eine fast 40-jährige Erfahrung in Fertigung und Vertrieb von Urinmess-Systemen zurückblicken. Die Urinmess-Systeme von B. Braun haben weltweit in der Intensivmedizin einen hohen Bekanntheitsgrad und

genießen bei Ärzten und Pflegekräften eine hohe Akzeptanz. Unsere Produkte in der Urinmessung haben immer einen wesentlichen Beitrag im Klinikalltag, bei Pflegekräften und Patienten geleistet: Harnwegsinfektionen als wesentliche

Mehr Sicherheit und Komfort war der Ansporn für die Weiterentwicklung des neuen Ureofix® 500 classic Urinmess-Systems. Die neuen Produktmerkmale bieten dem Anwender die folgenden Vorteile:

- Verringertes Infektionsrisiko
- Exakte Überwachung
- Nadelfreie Probenentnahme
- Bessere Behälterentleerung
- Einfache und sichere Aufhängung
- Latex- und DEHP-frei



Ursache nosokomialer Infektionen können reduziert, Arbeitsabläufe in den Kliniken vereinfacht und die Sicherheit der Anwendung erhöht werden.

B. Braun steht daher an vorderer Stelle unter den führenden

Herstellern von Urinmess-Systemen und wird weltweit von Kunden und Anwendern geschätzt. Unser neues weiterentwickeltes Ureofix® 500 classic Urinmess-System knüpft an diese Tradition an.

## Verringertes Infektionsrisiko

### Keine nassen Filter



Zwei geschützte Belüftungsfilter in Tropfkammer und Messbehälter

### Vermindertes Risiko von Harnwegsinfektionen

Trockene Strecke zwischen Überleitungsschlauch und Messkammer verhindert retrograde Migration von Bakterien

### Verhinderung des Urinrückflusses

- Integriertes Antirefluxventil verhindert den Urinrückfluss in den Überleitungsschlauch und damit in die Blase des Patienten
- Das Antirefluxventil ist normalerweise offen und schließt nur bei Rückfluss von Urin aus dem Behälter

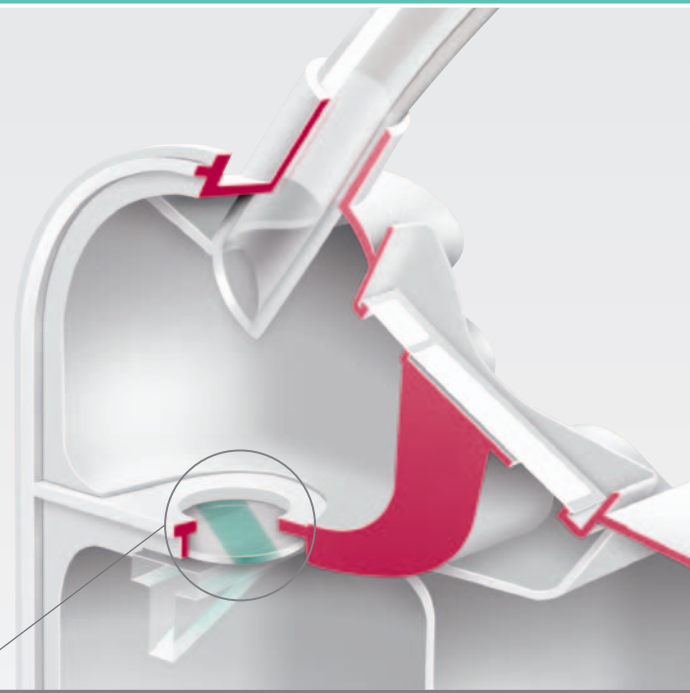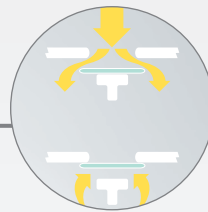

## Exakte Überwachung

- Die präzise Skala der Messkammer ermöglicht eine exakte Überwachung
- Zusätzliche Feinmesskammer für die Messung der Urinausscheidung auch bei Kindern



## Nadelfreie Probenentnahme

- Alle Versionen von Ureofix® 500 classic sind am Stufenkonus mit einem wiederabdichtenden Silikonport zur nadelfreien Probenentnahme ausgestattet (Probenentnahme ist auch mit Kanüle möglich)



# Ureofix® 500 classic

## Geschlossenes Urinmess-System

wenn's einfacher und leichter gehen soll



### Leichteres Erkennen der Fließrichtung

- Drehventil mit Identifikation der Fließrichtung ermöglicht ein leichteres Entleeren
- Drehventil mit griffsicherer Oberfläche und eindeutigen Symbolen „Kreuz“ und „Pfeil“




### Sichere Verbindung und Aufhängung

- Sammelbeutel ist durch einen bewährten Bajonettkonnektor fest und sicher mit der Messkammer verbunden
- Neue verstärkte rund Aufhängeösen sorgen für eine leichte und sichere Aufhängung des Sammelbeutels

## ... mit Ablasshahnbeutel

### Urinmess-System mit vormontiertem 2 L Ablasshahnbeutel

- Ablasshahn mit Stopper verhindert Leckagen
- Ablasshahn ist in „Parkposition“ in Kontakt mit Luft und trocknet daher rasch ab
- Bildung einer feuchten Kammer wird verhindert, daher kein Bakterienwachstum

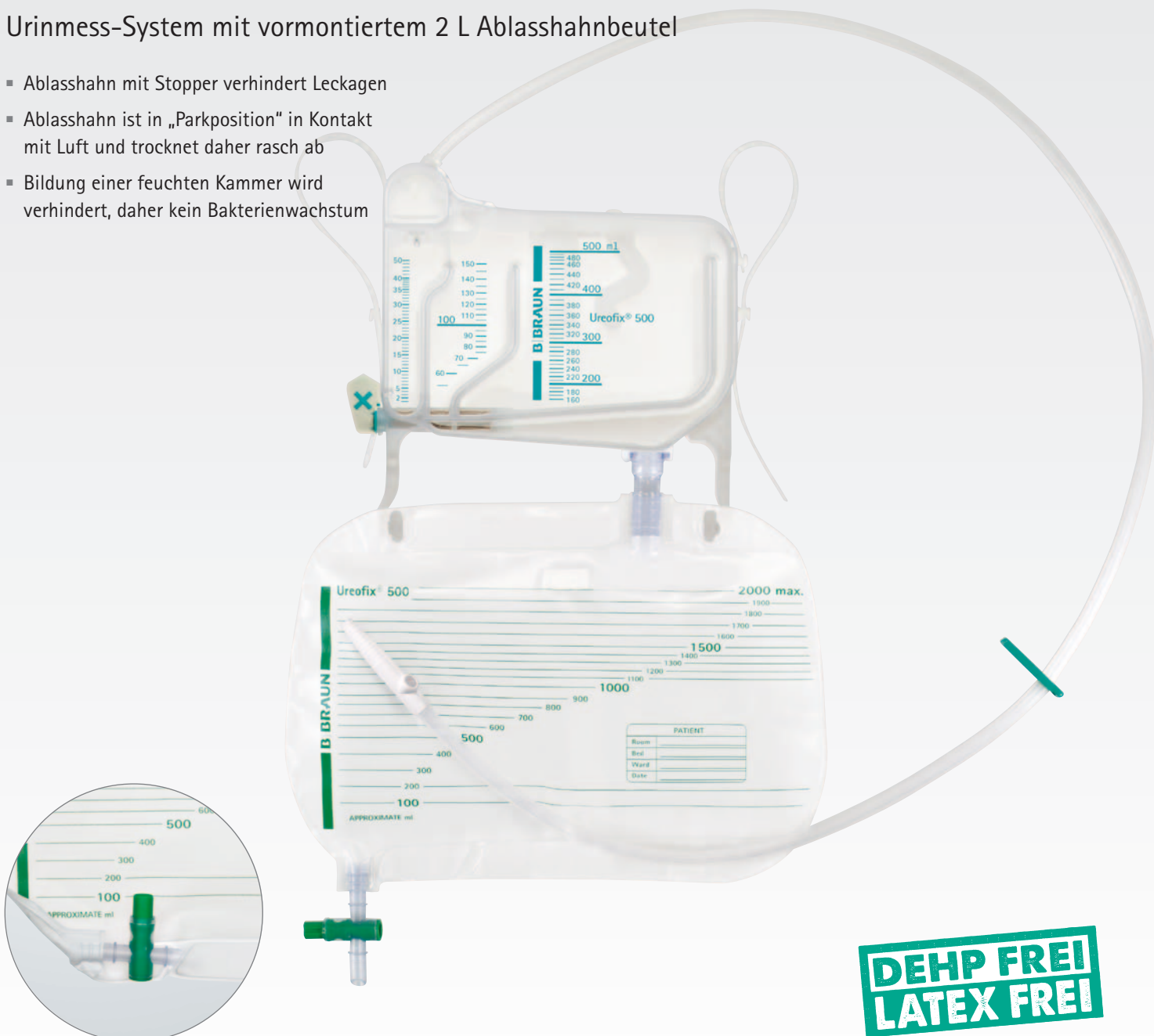


**DEHP FREI**  
**LATEX FREI**

## ... mit Wechselbeutel


### Urinmess-System mit 1,5 L und 3,5 L Wechselbeutel

- Wechselbeutel ohne Schiebeklemme mit Rückflusssperre und Belüftungsfilter
- Urin kann einfach nach Entfernen des Wechselbeutels über die Aufreißblase (TEAR) entsorgt werden

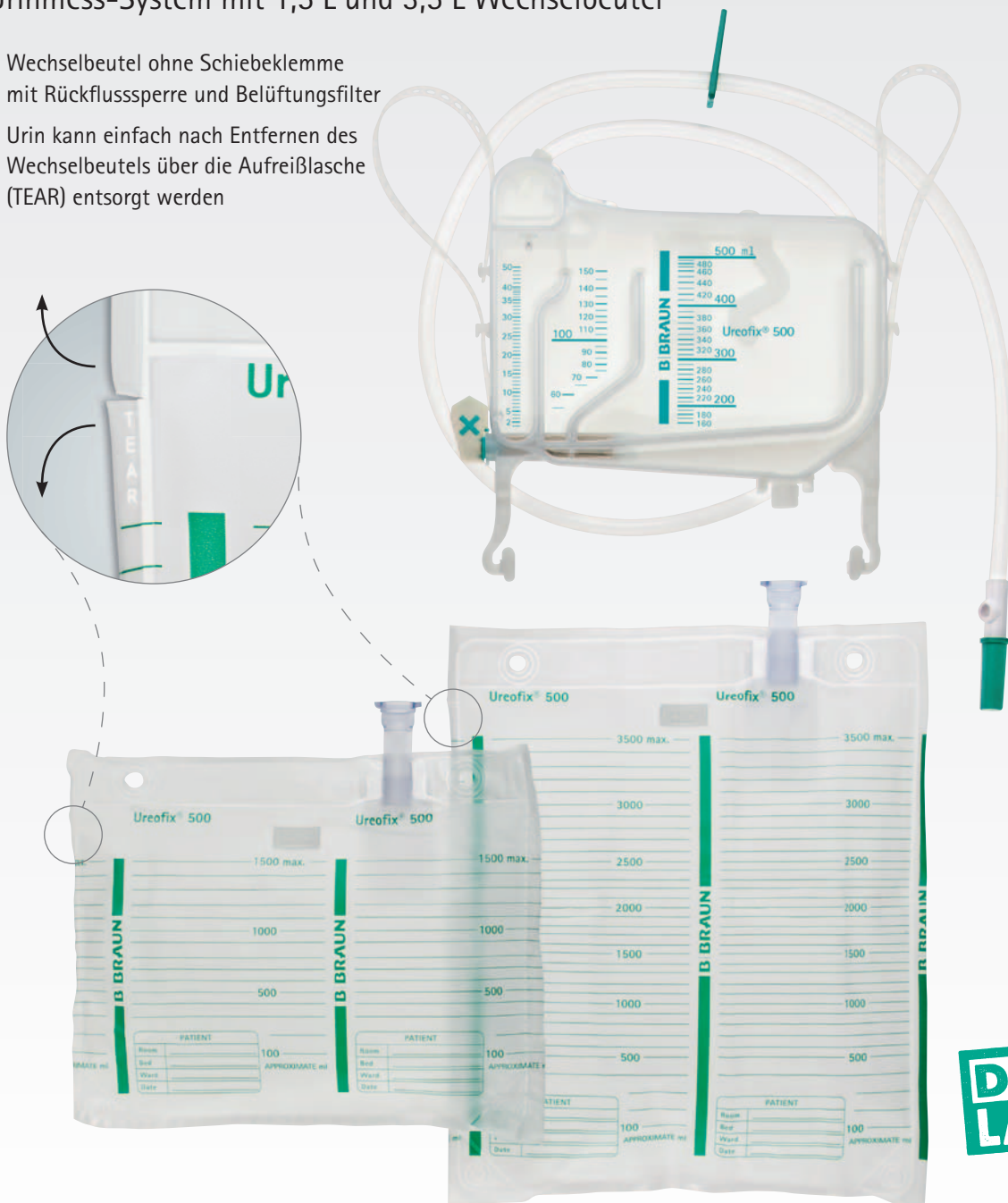

**DEHP FREI**  
**LATEX FREI**

## schnell aufgehängt, sicher fixiert

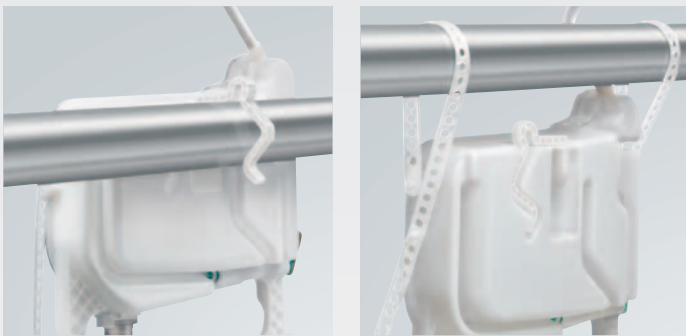

### Einfache und sichere Aufhängung

Für die Befestigung von Ureofix® 500 classic stehen folgende Schnellfixierhilfen zur Verfügung:




- Ein integrierter beweglicher Haken an der Rückseite der Messkammer
- Zwei vormontierte Lochbänder an den Seiten der Messkammer

oder zusätzlich optional:

- Ein Fixierband bzw. eine Fixierplatte basierend auf dem Zapfen-Buchsen-Prinzip, welches zur Aufhängung des Systems vorher am Bettholm befestigt wird. Fixierband bzw. Fixierplatte sind desinfektionsfähig und können daher am Bett verbleiben.

### Befestigung mittels Fixierband nach dem „Zapfen/Buchsen-Prinzip“

- ① Fixierband mit Buchse zur Fixierung des Mess-Systems am Bettholm
  - Zum Festspannen wird das Band durch den vorderen Spalt von unten nach oben durchgezogen
  - Zum Lösen wird der Hebel nach unten gedrückt und das Band nach unten zurückgeschoben
- ② Fixierband mit Buchse wird am Bettholm angelegt und festgespannt
- ③ Zapfen an der Rückseite der Messkammer wird in die Buchse eingesteckt
- ④ Mess-System hängt waagrecht und einsatzbereit am Bettholm und kann jederzeit leicht gewechselt werden

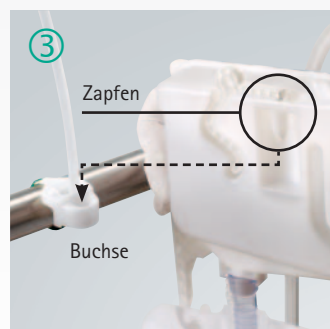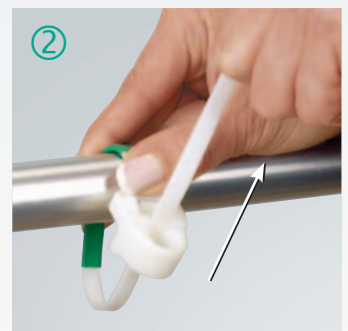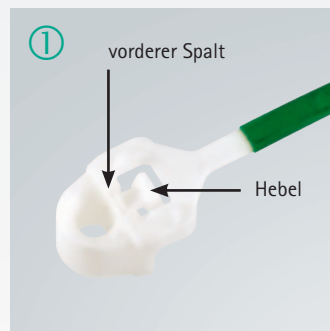

# Ureofix<sup>®</sup> 500 classic

## Handelsformen und Zubehör

Ureofix <sup>®</sup> 500 classic mit	Größe	Schlauchlänge	Art.-Nr.	Verk.-Einh./Stk.
Wechselbeutel	1,5 L	120 cm	4417910	10
	1,5 L	170 cm	4417920	10
Wechselbeutel	3,5 L	170 cm	4417960	10
Ablasshahnbeutel	2,0 L	120 cm	4417930	10
	2,0 L	170 cm	4417940	10
Zubehör	Größe		Art.-Nr.	Verk.-Einh./Stk.
Wechselbeutel mit Rückflusssperre	1,5 L		4417535	100
Wechselbeutel mit Rückflusssperre	3,5 L		4417543	100
Ablasshahnbeutel mit Rückflusssperre	2,0 L		4417551	100
Fixierband			4417755	10 x 10
Fixierplatte			4417780	25

B. Braun Melsungen AG | Hospital Care | 34209 Melsungen | Deutschland  
 Tel. +49 5661 71-27 75 | Fax +49 5661 75-41 11 | [www.bbraun.de](http://www.bbraun.de)

B. Braun Austria GmbH | Otto-Braun-Str. 3-5 | 2344 Maria Enzersdorf | Österreich  
 Tel. +43 2236 465 41-0 | Fax +43 2236 484-79 | [www.bbraun.at](http://www.bbraun.at)

B. Braun Medical AG | Seesatz 17 | 6204 Sempach | Schweiz  
 Tel. +41 58 258 50-00 | Fax +41 58 258 60-00 | [www.bbraun.ch](http://www.bbraun.ch)